


Pokyny pred odberom vzorky

1. Nalepte na odberovú skúmavku tento QR kód 
2. Paličkovým písmom napíšte svoje Meno a Priezvisko na odberovú skúmavku (miesto pod Dátumom expirácie).

Pokyny k odberu vzorky

1. Odber realizujte v Pondelok, Utorok alebo v Streda.
2. Na odber je najvhodnejšia ranná stolica hneď po prebudení. Ak to nie je možné, môžete odobrať vzorku aj v inú dennú hodinu.
3. Roztok na konzerváciu vzoriek nevyliievajte z odberovej skúmavky!
4. Konzervačnú tekutinu nepite. Ak ju požívate omylom, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Uchovávajte odberovú súpravu mimo dosahu detí.
6. Ak pri odbere vzorky použijete priložený papier na odobratie vzorky (návod nižšie), papier nenapínajte, ale naopak uvoľnite smerom do misy, aby bol na stolicu dostatočný priestor. Papier po odobratí vzorky spláchnite spolu so stolicou. Na zachytenie vzorky môžete použiť aj väčšiu vrstvu toaletného papiera, alebo čistú nádobu (napr. v prípade pretrhnutia papiera na odobratie vzorky). **Kľúčové je nemiešať moč, toaletný papier alebo odpadový vodu (splšky) s odobieranou vzorkou stolice.**
7. Po odbere vzorky nezabudnite pevne utiahnuť uzáver odberovej skúmavky, vložiť do uzatvárateľného ColoTect vrečka a utiesniť ho. **Uistite sa, že nič zo skúmavky neuniká.**
8. Uzavratel'né ColoTect vrečko s odobratou Vzorkou, Žiadanku a Informovaný súhlas vložte do ColoTect boxu. **Nezabudnite dopísať dátum odberu vzorky do Žiadanky.**
9. Doručte ColoTect box Vášmu ošetrojúcemu lekárovi **čo najskôr, najlepšie v deň odobratia vzorky. Najneskôr nasledujúci deň.**
10. Uchovávajte a prepravujte vzorku **pri izbovej teplote.**

Odberový proces

<p>1</p>  <p>Otvorte uzatvárateľné ColoTect vrečko a vyberte všetky pomôcky. Zdvihnite veko a sedadlo toalety. Položte papier na odobratie vzorky (tvar „T“) na toaletu.</p>	<p>2</p>  <p>Nalepte lepiacu pásku na okraj toaletnej misy a papier na odobratie vzorky ponechajte jemne ohnutý smerom dnu. Zložte záchodové sedadlo a vyprázdnite sa.</p>	<p>3</p>  <p>Odskrutkujte skúmavku na uchovávanie vzorky stolice a uistite sa, že ju držíte rovno/zvislo. Zbernou lyžicou odoberte vzorku stolice na 3-5 miestach.</p>
<p>4</p>  <p>Odobratú vzorku preneste do skúmavky v takom množstve, aby hladina kvapaliny dosahovala po červenú čiaru.</p>	<p>5</p>  <p>Pevne utiahnite uzáver skúmavky. Jemne premiešajte a vložte do pôvodného obalu (uzatvárateľného ColoTect vrečka).</p>	<p>6</p>  <p>Lyžicu na odber vzoriek a jednorazové rukavice zlikvidujte.</p>

Distribútor pre Slovensko:
Zentya, a.s.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava

mail: colotect@zentya.sk
tel. č.: +421 915 842 336